

Praktijkonderhoud

Check-up voor apparatuur in uw praktijk

Goede apparatuur heeft preventief onderhoud. Veilig, nauwkeurig en verantwoord werken kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt. De technische dienst bestaat uit een team van gespecialiseerde technici die over de juiste opleiding, certificeringen en apparatuur beschikken om medische apparatuur te controleren en indien nodig reparaties uit te voeren.

Na een controle ontvangt u een eindrapport met de testresultaten en eventuele aanbevelingen tot reparatie of vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.

Na preventief onderhoud en/of reparatie ontvangt u per email een werkrapport met uitgevoerde werkzaamheden en evt. aanbevelingen.


- Preventief onderhoud zorgt voor een langere levensduur en minder uitval
- Uw organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen
- Reparaties ter plaatse (indien mogelijk), apparatuur blijft ter beschikking
- Jaarlijkse controle op een in overleg te bepalen tijdstip, voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties

Onze serviceverleningsovereenkomsten zijn onderverdeeld in diverse pakketten zodat u zelf de keuze kunt maken welk pakket het beste bij uw praktijk past.

Bij Covetrus bent u verzekerd van de best mogelijke service!



Pakket 1 Controle apparatuur

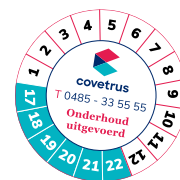

Weegschalen

Analoog/digitaal, visuele en functie controle en gewichtscntrole met behulp van gewichten

Bloeddrukmeters

Algemene controle op functioneren van de bloeddrukmeter en transducer

Centrifuges

Controle op juist functioneren en balans

Broedstoof en Hetelucht Sterilisatoren

Visuele en functionele controle. Controle op juiste temperatuur d.m.v. digitaal meetinstrument. (apparaat dient van te voren opgewarmd te worden)

Tondeuse

Controle op juiste werking, visuele controle kabels, lader, batterijconditie/koolborstels en scheerkop (afhankelijk van type)

Otoscoop, Laryngoscoop, Ophthalmoscoop

Functie controle, visuele controle snoeren, lader en accuconditie

Stethoscoop

Visuele controle membraam en slangen

Antiblaflband

Controle op juiste werking, lekttest, batterijconditie

Infuuspomp

Algemene controle op juiste werking, alarm en dosering

Afzuigpomp

Algemene controle op juiste werking, visuele controle conditie slangen en bacteriefilter

Elektrotoom

Algemene controle op juiste werking, visuele controle conditie kabels en accessoires

Microscoop

Algemene controle op juiste werking, visuele controle conditie

Koelbox

Controle koelfunctie m.b.v. meetapparaat

Sealapparaat

Controle op juiste werking, statuscontrole van de sealbalken en sealkwaliteit

Gipszaag

Controle op juiste werking, visuele controle kabel, lader, koolborstels

Brandapparaat

Controle op juiste werking, visuele controle snoeren, temperatuur controle brandertip

Verwarmingsmat

Visuele controle op beschadigingen mat, kabel, functietest met meetapparaat

Refractometer

Visuele controle en controle van de afstelling

Opnamekooien

Controle afstelling deursluiting

Tabouret

Visuele controle, werking gasveer

Tafel

Algemene controle op juiste werking, visuele controle kabels

Ultrasoon reinigingsbad

Visuele controle conditie tank, werking controleren d.m.v. folietest

Lamp

Visuele en functie controle van de afstelling en werking verlichting

Motorsysteem

Algemene controle op werking, specifieke controle op conditie micromotor en hoekstukken

Onthoorningsapparaat

Visuele controle op kabels en brander, temperatuur controle meting

Oorspoelapparaat

Algemene controle op functie, controle watertemperatuur

Tandsteenreiniger

Algemene controle op functie, waterdosering en tipslijtage

Zuurstofgenerator

Algemene controle op functie en specifiek werkdrukmeting, flowcontrole en controlemeting O2 waarde

Toelichting

Een service technicus controleert jaarlijks uw apparatuur. Op basis van deze lijst selecteert u samen met de service technicus welke apparatuur u wilt laten controleren.



Pakket 2 Tandheelkunde unit

Vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw dental unit en vergroot de betrouwbaarheid. Tijdens het onderhoud inspecteert de technicus de algemene staat van de unit. Daarna volgt een inspectie van mechanische en elektronische onderdelen, evenals het reinigen en vervangen van diverse onderdelen die verslijten bij gebruik zoals pakkingen, olie, waterfilters en luchtfilters en wordt de werking gecontroleerd. Defecte of minder betrouwbare componenten worden zo nodig vervangen, dit ter beoordeling van de service technicus. Als hier kosten aan verbonden zijn wordt eerst overlegd. Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u een ondertekend onderhoudsprotocol.

Voordelen onderhoudsabonnement:

- Ontzorging en gemak
- Gunstigere tarieven
- Jaarlijks preventief onderhoud, inclusief basis onderdelen
- Prioriteit bij onze technische dienst
- 15% korting op werkuren en onderdelen bij reparatie



Pakket 3 Autoclaaf

Vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw autoclaaf en vergroot de betrouwbaarheid. Tijdens het onderhoud inspecteert de **gecertificeerde** technicus het geheugen van de autoclaaf op eventuele storingen en foutmeldingen gedurende het afgelopen jaar. Deurring, filters en pakkingen worden vervangen. Daarna volgt een inspectie van mechanische en elektronische onderdelen, evenals het reinigen en/of vervangen van versleten, defecte of minder betrouwbare componenten en wordt de werking gecontroleerd. Onderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn worden zonedig vervangen, dit ter beoordeling van de service technicus. Als hier kosten aan verbonden zijn wordt eerst overlegd. Na het onderhoud wordt de autoclaaf getest op de capaciteit van de luchtverdrrijving en de stoompenetratie in de ketel van de autoclaaf. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een steriliteitstest volgens het protocol. Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u een ondertekend onderhoudsprotocol.

Voordelen onderhoudsabonnement:

- Ontzorging en gemak
- Gunstigere tarieven
- Jaarlijks preventief onderhoud, inclusief basis onderdelen
- Prioriteit bij onze technische dienst
- 15% korting op werkuren en onderdelen bij reparatie



Pakket 4 Anesthesie apparatuur

Vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw narcoseapparaat en vergroot de betrouwbaarheid. Tijdens het onderhoud inspecteert de technicus de algemene staat van het apparaat. Daarna volgt een inspectie van onderdelen en wordt er een druktest gedaan om eventuele lekkages te vinden, evenals het reinigen van diverse onderdelen. Defecte of minder betrouwbare componenten worden zo nodig vervangen, dit ter beoordeling van de service technicus. Hierbij wordt het gehele apparaat inclusief zuurstofgenerator en de gasnarcose afvoer meegenomen. De verdamper wordt om de 2 jaar vervangen en gereviseerd als u een verdamper heeft. Als u zelf geen verdamper heeft kunt u die aanschaffen of een tijdelijke verdamper gebruiken. Als hier kosten aan verbonden zijn wordt eerst overlegd. Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u een ondertekend keuringsrapport.

Voordelen onderhoudsabonnement:

- Ontzorging en gemak
- Gunstigere tarieven
- Jaarlijks preventief onderhoud, inclusief basis onderdelen
- Prioriteit bij onze technische dienst
- 15% korting op werkuren en onderdelen bij reparatie



Inschrijfformulier Praktijkonderhoud

Meldt zich aan voor onderhoudsabonnement pakket:

 Pakket 1 Controle apparatuur Gehele dag Pakket 2 Tandheelkunde unit Halve dag Tandheelkunde Unit Prestige Tandheelkunde Unit IM3 Pro Tandheelkunde Unit IM3 GS Tandheelkunde Unit IM3 GS inclusief compressor Tandheelkunde Unit KRUUSE**Serienummer:** Pakket 3 Autoclaaf Autoclaaf Prestige Anima Autoclaaf Melag 23 vs Autoclaaf Melag 24 BL+ Autoclaaf Melag 24 B+ Autoclaaf Melag 23 EN Autoclaaf Melag 23 B+ Pakket 4 Anesthesie apparatuur

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden voor technisch onderhoud.

Stuur het ingevulde formulier naar:

Covetrus
Postbus 94
5430 AB Cuijk

E-mail: td@covetrus.nl
Tel: 0485 - 33 55 55